

## Használati útmutató

**ÖSSZETÉTEL:** Ringer-oldat (nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid 2 H<sub>2</sub>O és injekcióhoz való víz felhasználásával készült izotóniás elektrolitoldat), makrogol, 0,02% polihexanid (LAVANID® 1), ill. 0,04% polihexanid (LAVANID® 2).

**JAVALLATOK:** • helyi seböblítésre és sebtisztításra • törlők, tamponok és kötszerek átitatására szolgáló oldat

**ELLENJAVALLATOK:** Ne használja a LAVANID® seböblítő oldatot • a központi idegrendszer teljes területén (beleértve az agyhártyát) • a porcok és ízületek területén • a közép- vagy belső fülben • intraperitoneálisan • valamelyik összetevővel szembeni ismert túlérzékenység esetén • terhesség és szoptatás ideje alatt

**KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK:** Kizárólag tiszta oldatot szabad használni! Nem keverhető adalékanyagokkal. Ne sterilizálja újra! Az újrasztilizálás kritikus mértékben megváltoztathatja a termék felhasználhatóságát. A záródugó lehetővé teszi az öblítőoldat aszeptikus kinyerését, pl. egy spike (tüske) segítségével. Alternatív megoldásként a csavaros kupak eltávolítható, és az oldat kiönthető.

**GYÓGYSZERKÖLCSÖNHATÁSOK:** Más sebkezelő termékekkel való együttes használat esetén ellenőrizni kell a termékek használati utasítását a LAVANID® összetevőivel való esetleges kölcsönhatások ellenőrzése érdekében. A polihexanid összetevő bizonyos gyógyszerekkel szembeni inkompatibilitásából fakadóan ne használja a LAVANID® oldatot anionos anyagokkal (pl. anionos felületaktív anyagokkal vagy anionos gélképzőkkel). A povidon-jódot tartalmazó készítményekkel végzett preoperatív bőrfertőtlenítés után a LAVANID® intraoperatív öblítésre használható. Kerülje a povidon-jodid és a LAVANID® öblítőoldat közvetlen érintkezését a seb felületén.

**MELLÉKHATÁSOKA** polihexanid összetevő allergiás reakciót válthat ki. Egyes esetekben az immunrendszer akut reakcióiról (anafilaxiás reakciókról) is beszámoltak. A felhasználókat és/vagy a pácienseket kérjük, hogy a termék használatával összefüggésben fellépő valamennyi súlyos eseményt jelentsék a gyártónak és az illetékes hatóságoknak.

**AZ ADAGOLÁSRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK, A HASZNÁLAT MÓDJA ÉS IDŐTARTAMA:** Seböblítésre műtéti beavatkozások alatt, illetve öblítést vagy nedvesítést igénylő diagnosztikai és terápiás eljárások során.

A SZAVATOSSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: A lejárat dátum a címkén található. A lejárat dátum után ne használja fel! Felbontás után minőségét megőrzi: 2 hónap.

AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: A fel nem használt termékek vagy hulladékok ártalmatlanítását a vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.

Forgalmazó: Izinta Kft. 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. info@izinta.hu; +36 1 392 2654  
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2020. 10.

Gyártó: Serag-Wiessner GmbH & Co. KG Zum Kugelfang 8-12. 95119 Naila / Germany

Az útmutató a flakon kinyitásához és a jelmagyarázat a képeknél található.